
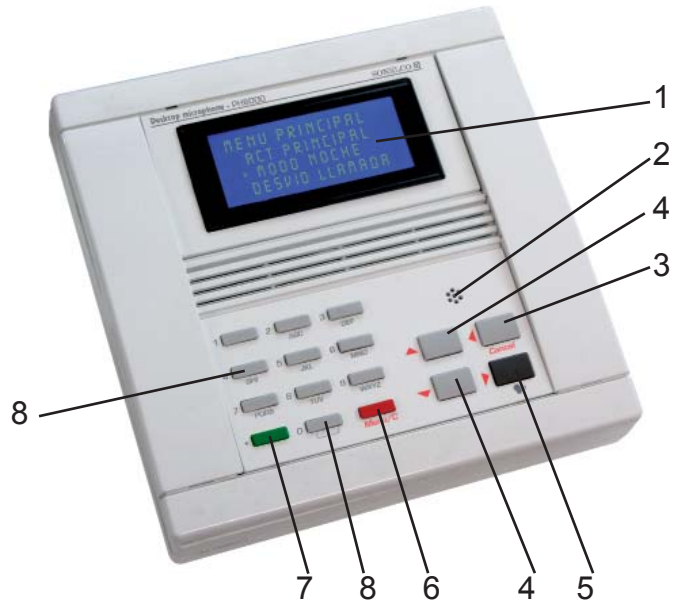


MANUAL DE INSTALADOR - PH6000

4FA038800

PUPITRE PARA SISTEMA DE COMUNICACIONES EN HOSPITALES Y RESIDENCIAS

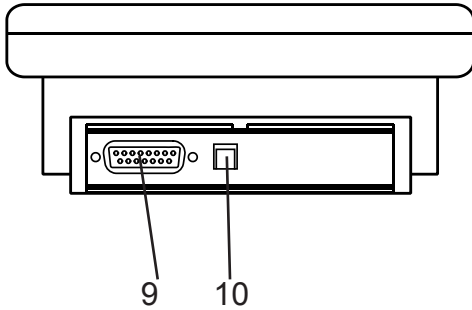

- 1 - Display 2 - Micrófono 3 - Tecla de navegación/cancelación
4 - Teclas de navegación 5 - Tecla de navegación/llamada - 6 -
Tecla de menú 7 - Tecla de recordatorio de llamada 8 - Teclado
alfanumérico 9 - Conector DB15 a línea 10 - Conector auxiliar.

DESCRIPCION

Pupitre para controlar todo el flujo de información que se produce con las habitaciones. Informa de las llamadas de habitación, permitiendo atenderlas, y en las instalaciones con voz, posibilita la comunicación entre enfermera y paciente, incorporando un micrófono con control automático de ganancia y visualización de funciones en distintos idiomas mediante display.

CARACTERISTICAS GENERALES

- Incorpora display LCD alfanumérico de gran visibilidad (4 líneas) en color azul.
- Teclado alfanumérico que permite realizar llamadas a las habitaciones de forma individual o a todas a la vez.
- Micrófono con control automático de ganancia con altavoz de alta calidad.
- Incluye conector para teléfono auxiliar PH6001, para los caso en los que se desee intimidad.
- Respuesta a las llamadas de los pacientes apretando un sólo un botón.
- Posibilidad de interconectar varios puestos, con desvío a uno de ellos en los periodos deseados.
- Cada puesto puede controlar hasta 99 habitaciones (módulos PH6010 o PH6011).
- Máximo de 49 puestos de control interconectados entre si.

CARACTERISTICAS TÉCNICAS

Potencia nominal de la salida de altavoz: 1W
Tensión de alimentación: 15V
Consumo máximo con audio: 232 mA:
Consumo máximo sin audio: 90 mA:
Dimensiones:
Caja : 85 x 150 x 150 mm.
Peso: 800 grs.


CONEXIONADO

Antes de proceder al conexionado asegúrese de que la alimentación esté apagada.

- Se conecta un cable P5906 entre el conector DB15 y un módulo PCH6009 sobre el que se harán las siguientes conexiones:

NOTA: El cableado del sistema debe montarse separadamente de la red eléctrica, según normativa.

EJEMPLOS DE INSTALACION

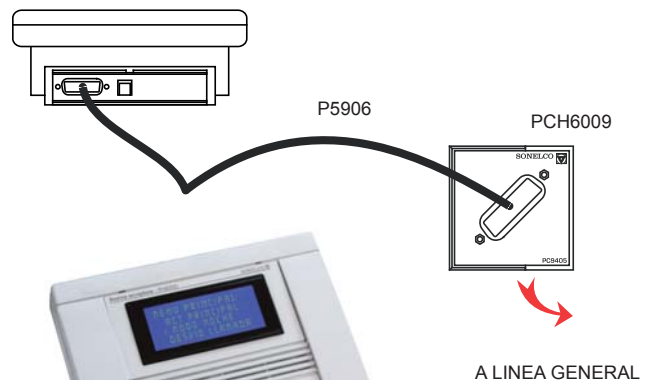

A LINEA GENERAL

FUNCIONAMIENTO

CONFIGURACIONES GENERALES DEL PUESTO DE CONTROL

1.- Cambiar el idioma

Para cambiar el idioma seguir la siguiente secuencia partiendo de la pantalla principal:

- Pulsar tecla (6) MENU/C.
- En el "MENU PRINCIPAL" seleccionar "CONFIGURAR" con las teclas ▲▼ (4).
- Aceptar esa opción pulsando la tecla ► (5). Entramos en la pantalla de "MENU CONFIGURAR".
- Aceptar "IDIOMA" (por defecto) pulsando la tecla ► (5). Entramos en el "MENU IDIOMA".
- Seleccionamos "ESPAÑOL" o "INGLES" con las teclas ▲▼ (4).
- Aceptamos pulsando la tecla ► (5). Una vez aceptado volvemos a la pantalla de "MENU IDIOMA".
- Para salir totalmente de las opciones de configuración ir pulsando la tecla ◀ (3) hasta que aparezca la pantalla inicial.

2.- Cambiar el volumen del emisión de aviso

Para cambiar el volumen del micrófono seguir la siguiente secuencia partiendo de la pantalla principal:

- Pulsar tecla (6) MENU/C.
- En el "MENU PRINCIPAL" seleccionar "CONFIGURAR" con las teclas ▲▼ (4).
- Aceptar esa opción pulsando ► (5). Entramos en la pantalla de "MENU CONFIGURAR".
- Seleccionar "VOLUMEN MICRO" con las teclas ▲▼ (4).
- Aceptar pulsando la tecla ► (5). Entramos a cambiar el volumen micro.
- Seleccionamos entre -3, -1, 0, +1, +3 (incremento en dB's) con la tecla (6) MENU/C y pulsamos ► (5) para aceptar la opción deseada.
- Una vez aceptado volvemos a la pantalla display (1) de "MENU CONFIGURAR".
- Para salir totalmente de las opciones de configuración ir pulsando la tecla ◀ (3) hasta que aparezca la pantalla inicial.

CORRESPONDENCIA HILOS DE LINEA CON CONECTOR DB15

PIN DB15	PCH6009(Pupitre PH6000)
1	CH+
2	CH-
3	CH+
4	CH-
5	C
6	NO
7	7H
8	2
9	4
10	7P
11	CP+
12	-
13	CP-
14	CP+
15	CP-